

Ref : Desintop SF, ámbito clínico

Revisión: 24/04/07

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL

DESINTOP SF

COMPOSICION

Glutaral..... 2 %.
Otros disolventes y excipientes c.s.p..... 100 %.

INDICACIONES

Desinfectante de superficies en el ámbito clínico.

Está recomendado su uso en desinfecciones de superficies por vía aérea, en el ámbito clínico de aquellos locales donde se requiera un elevado nivel de desinfección, en ausencia de personas.

MODO DE EMPLEO

Microdifusión electrotérmica del producto sin diluir. Aplicar 10 minutos de microdifusión por cada 100 m³ de local a tratar. Una vez aplicado el producto se dejará actuar durante al menos 15 minutos.

No ingerir. Uso por personal especializado. Aplicar en ausencia de personas. No mezclar con ningún otro producto químico. Úsese indumentaria adecuada.

No entrar en el recinto hasta transcurridas: 3 horas.

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto: Líquido

Color: Naranja

pH: Aprox 4,5

ACTIVIDAD

Bactericida.

Conforme a la Norma UNE EN 1276, Desintop SF, posee actividad bactericida, después de 5 minutos de contacto a 20°C, en condiciones sucias de ensayo (3 g/l. de albúmina bovina), para las siguientes cepas de referencia:

Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Fungicida.

Conforme a la Norma UNE EN 1650, Desintop SF, posee actividad fungicida, después de 15 minutos de contacto a 20°C, en condiciones sucias de ensayo (3 g/l. de albúmina bovina), para las siguientes cepas de referencia:

Aspergillus níger ATCC 16404
Candida albicans ATCC 10231

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. Usen guantes apropiados. Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. Atención: contiene glutaraldehído. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico, y muéstrela la etiqueta o el envase. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica., Telf: 91 562 04 20. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PRESENTACION

Bidón de 10 litros.

nº Reg AEMPS: 94_DES

TECNODIAL, S.A. Ctra Torrejón-Ajalvir Km 5,2. 28864 Ajalvir (Madrid). Telf 91 884 45 10